



**ANWENDUNG: PROBENNAHME**  
**HOW TO USE: COLLECTING**


# paraTEST® VET ad us. vet.

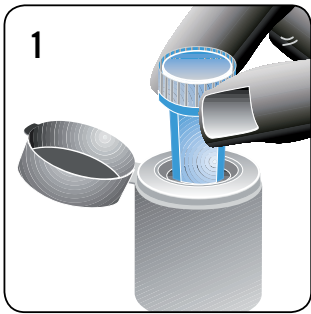

Deckel öffnen und blauen Einsatz herausnehmen.  
Lift the cap and remove blue insert.

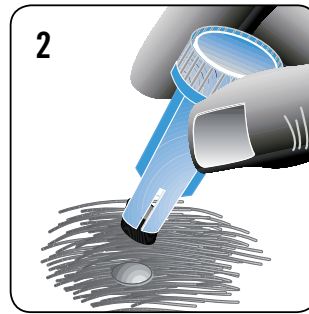

Mit dem schmalen Ende des blauen Einsatzes Kotprobe aufnehmen.  
Push the small end of blue insert into the stool to collect a fecal sample.

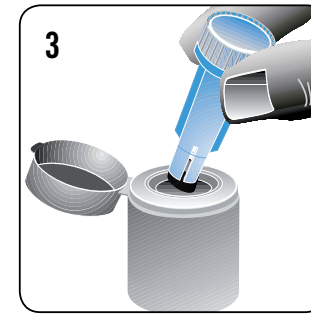

Den blauen Einsatz mit der Probe ohne Einrasten wieder in die Box stecken, Deckel schließen und zum Tierarzt bzw. ins Labor bringen.  
Replace the blue insert in the container, close cap and take to your veterinary surgeon or laboratory as appropriate.



Im Falle des Überlaufens wird die Flotationslösung im äußeren Ring des Einsatzes aufgefangen.  
In case of overflow, the flotation solution will be collected in the outer ring of the insert.



